

## Instrucciones de uso

**LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. LOS LENTES DE CONTACTO 1-DAY ACUVUE MOIST® con LACREON® Y 1-DAY ACUVUE MOIST® con LACREON® para ASTIGMATISMO SON PRODUCTOS SANITARIOS Y SIEMPRE DEBEN SER ADAPTADOS POR UN PROFESIONAL DE LA VISIÓN. SIGA SIEMPRE LAS INDICACIONES DE SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN Y LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN ESTE FOLLETO.**

El (los) lente(s) de contacto se pueden llamar “el (los) lente(s)” en el resto del documento. UV se refiere a Ultravioleta

Nombre de la marca	Material	Solución de Envasado	Forma de Uso
1-DAY ACUVUE MOIST® con LACREON®	etafilcon A	Solución salina tamponada	1 día
1-DAY ACUVUE MOIST® con LACREON® para ASTIGMATISMO		de borato con povidona.	

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO y USO INDICADO

Los lentes de contacto 1-DAY ACUVUE MOIST® con LACREON® están indicados en el uso diario para la corrección óptica de errores refractivos,

miopía e hipermetropía, en personas con ojos sanos que tengan hasta 1,00 D de astigmatismo.

Los lentes de contacto 1-DAY ACUVUE MOIST® con LACREON® para Astigmatismo están indicados en el uso diario para la corrección óptica de errores refractivos, miopía e hipermetropía, en personas con ojos sanos que tengan hasta 2,25 D de astigmatismo.

NO UTILICE LOS LENTES MIENTRAS DUERME.

Todos los lentes de contacto de marca ACUVUE® contienen un filtro ULTRAVIOLETA (UV) que ayuda a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta.

**ADVERTENCIA: LOS LENTES DE CONTACTO CON FILTRO ULTRAVIOLETA (UV) no sustituyen a los protectores oculares contra los rayos ultravioleta, tales como las gafas de protección o gafas de sol que absorben los rayos ultravioleta, ya que no cubren completamente el ojo y la zona circundante. Se recomienda seguir utilizando protectores oculares contra los rayos ultravioleta.**

**NOTA: La exposición prolongada a la radiación ultravioleta (UV) es uno de los factores de riesgo asociados a las cataratas. La exposición se ve afectada por una serie de factores como las condiciones del entorno (la altitud, la geografía, la nubosidad) y los factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Los lentes de contacto con**

**protección UV ayudan a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos que demuestren que llevar lentes de contacto con protección UV reduzca el riesgo de desarrollar cataratas u otras afecciones oculares.**

**Su profesional de la visión determinará el esquema de uso (cuanto tiempo usted debería utilizar los lentes cada día). Cuando se prescriben para uso único y reemplazo diario, los lentes deben ser desechados luego de removerlos.**

## 2. CONTRAINDICACIONES (Cuándo no se deben utilizar lentes)

**NO UTILICE** estos lentes si presenta alguna de las siguientes afecciones:

- Incomodidad ocular
- Pérdida de visión
- Cambios en la visión
- Lagrimeo excesivo
- Enrojecimiento ocular u
- Otros problemas oculares

**REMUEVA INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN.**

- Estos lentes están prescritos para uso diario y un solo uso (el profesional de la visión indica se remuevan al final del día).
- Si sus ojos están rojos o irritados
- Irritación del ojo causada por reacciones alérgicas a ingredientes de las soluciones de lentes de contacto (es decir, gotas humectantes). Estas soluciones pueden contener sustancias químicas o conservadores (como mercurio, timerosal, etc.) a los que algunas personas pueden desarrollar una respuesta alérgica.

**3. ADVERTENCIAS - Lo que debe saber acerca del uso de lentes de contacto SE PUEDEN DESARROLLAR RÁPIDAMENTE PROBLEMAS OCULARES, INCLUIDAS ÚLCERAS CORNEALES Y OCASIONAR UNA PÉRDIDA DE VISIÓN. SI EXPERIMENTA**

- Incomodidad ocular
- Pérdida de visión
- Cambios en la visión
- Lagrimeo excesivo
- Enrojecimiento ocular u
- Otros problemas oculares

## 4. PRECAUCIONES

- NUNCA utilice pinzas u otras herramientas para sacar sus lentes del envase/blíster.
- Recuerde, comience siempre con el mismo ojo.
- Asegúrese siempre de que el lente esté en el ojo y de que lo ve claramente antes de comenzar la técnica de retirada.
- Los lentes de uso único y reemplazo diario no deben usarse mientras duerme. Los estudios clínicos han demostrado que el riesgo de problemas oculares graves aumenta cuando se usan lentes durante la noche.<sup>1</sup>
- Diversos estudios han demostrado que el riesgo de problemas oculares en personas que utilizan lentes de contacto es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores.
- Los problemas con los lentes de contacto o los productos para su cuidado pueden ocasionar lesiones oculares graves
- El uso y cuidado adecuados de lentes de contacto y sus productos son esenciales para el uso seguro de estos productos.
- El riesgo general de ocasionar problemas oculares serios puede reducirse si se siguen cuidadosamente las instrucciones para el uso y desecho correcto de los lentes de contacto.

**5. REACCIONES ADVERSAS (efectos secundarios) - Posibles problemas y cómo abordarlos**

**Tenga en cuenta que pueden surgir problemas al usar lentes de contacto y que pueden estar asociados con uno o varios de los siguientes síntomas:**

- Comezón, ardor, punzadas y/o sequedad en los ojos
- Incomodidad o sensación de tener algo dentro del ojo
- Hinchazón o inflamación dentro o alrededor de los ojos
- Enrojecimiento ocular
- Problemas en los párpados
- Ojos llorosos y secreciones oculares inusuales
- Mala visión y/o visión borrosa
- Arco iris o halos alrededor de los objetos
- Sensibilidad a la luz (fotofobia)

**6. REACCIONES ADVERSAS (efectos secundarios) - Posibles problemas y cómo abordarlos**

**Tenga en cuenta que pueden surgir problemas al usar lentes de contacto y que pueden estar asociados con uno o varios de los siguientes síntomas:**

- Comezón, ardor, punzadas y/o sequedad en los ojos
- Incomodidad o sensación de tener algo dentro del ojo
- Hinchazón o inflamación dentro o alrededor de los ojos
- Enrojecimiento ocular
- Problemas en los párpados
- Ojos llorosos y secreciones oculares inusuales
- Mala visión y/o visión borrosa
- Arco iris o halos alrededor de los objetos
- Sensibilidad a la luz (fotofobia)

**7. REACCIONES ADVERSAS (efectos secundarios) - Posibles problemas y cómo abordarlos**

**Tenga en cuenta que pueden surgir problemas al usar lentes de contacto y que pueden estar asociados con uno o varios de los siguientes síntomas:**

- Comezón, ardor, punzadas y/o sequedad en los ojos
- Incomodidad o sensación de tener algo dentro del ojo
- Hinchazón o inflamación dentro o alrededor de los ojos
- Enrojecimiento ocular
- Problemas en los párpados
- Ojos llorosos y secreciones oculares inusuales
- Mala visión y/o visión borrosa
- Arco iris o halos alrededor de los objetos
- Sensibilidad a la luz (fotofobia)

**8. REACCIONES ADVERSAS (efectos secundarios) - Posibles problemas y cómo abordarlos**

**Tenga en cuenta que pueden surgir problemas al usar lentes de contacto y que pueden estar asociados con uno o varios de los siguientes síntomas:**

- Comezón, ardor, punzadas y/o sequedad en los ojos
- Incomodidad o sensación de tener algo dentro del ojo
- Hinchazón o inflamación dentro o alrededor de los ojos
- Enrojecimiento ocular
- Problemas en los párpados
- Ojos llorosos y secreciones oculares inusuales
- Mala visión y/o visión borrosa
- Arco iris o halos alrededor de los objetos
- Sensibilidad a la luz (fotofobia)

**9. REACCIONES ADVERSAS (efectos secundarios) - Posibles problemas y cómo abordarlos**

**Tenga en cuenta que pueden surgir problemas al usar lentes de contacto y que pueden estar asociados con uno o varios de los siguientes síntomas:**

- Comezón, ardor, punzadas y/o sequedad en los ojos
- Incomodidad o sensación de tener algo dentro del ojo
- Hinchazón o inflamación dentro o alrededor de los ojos
- Enrojecimiento ocular
- Problemas en los párpados
- Ojos llorosos y secreciones oculares inusuales
- Mala visión y/o visión borrosa
- Arco iris o halos alrededor de los objetos
- Sensibilidad a la luz (fotofobia)

**10. REACCIONES ADVERSAS (efectos secundarios) - Posibles problemas y cómo abordarlos**

**Tenga en cuenta que pueden surgir problemas al usar lentes de contacto y que pueden estar asociados con uno o varios de los siguientes síntomas:**

- Comezón, ardor, punzadas y/o sequedad en los ojos
- Incomodidad o sensación de tener algo dentro del ojo
- Hinchazón o inflamación dentro o alrededor de los ojos
- Enrojecimiento ocular
- Problemas en los párpados
- Ojos llorosos y secreciones oculares inusuales
- Mala visión y/o visión borrosa
- Arco iris o halos alrededor de los objetos
- Sensibilidad a la luz (fotofobia)

- mientras que 1-2-3 invertidos indica que el lente está al revés. Si el lente está al revés (1-2-3 invertidos), voltee el lente y busque de nuevo los números para confirmar que la orientación del lente es la correcta.
- Con el lente en su dedo índice, utilice la otra mano para sujetar el párpado superior para evitar el parpadeo.
  - Baje el párpado inferior con los demás dedos de la misma mano con la que va a colocarlo.
  - Mire hacia el techo y coloque suavemente el lente en la parte inferior del ojo.
  - Suelte lentamente el párpado y cierre el ojo un momento.
  - Parpadee varias veces para centrar el lente.
  - Use la misma técnica cuando coloque el lente en el otro ojo.

Hay otros métodos para la colocación de los lentes. Si el método antes expuesto le resulta difícil, su profesional de la visión puede proporcionarle una alternativa.

**Paso 4: Comprobación de sus lentes**  
Después de colocar con éxito sus lentes, debe preguntarse lo siguiente:

- ¿Veo bien?
- ¿Cómo se sienten los lentes en mis ojos?
- ¿Cómo se ven mis ojos?

Si después de colocarse el lente, su visión es borrosa, verifique lo siguiente:

- El lente no está centrado en el ojo (consulte "Paso 5: Centrado del lente", a continuación, en este folleto).

• Si el lente está centrado, remueva el lente (consulte la sección "Remoción de los lentes") y verifique lo siguiente:

- Cosméticos o aceites sobre el lente. Deseche el lente y coloque uno nuevo.
- El lente se encuentra en el ojo equivocado.
- El lente se encuentra al revés (tampoco se sentiría cómodo como de costumbre). Vea el Paso 3: Colocación del lente en el ojo".

Si advierte que su visión aún es borrosa después de verificar las posibilidades anteriores, remueva los lentes y consulte a su profesional de la visión.

**Nota:** Si un lente se vuelve menos cómodo que cuando lo insertó por primera vez o si resulta muy incómodo al insertarlo, remueva el lente de inmediato y comuníquese con su profesional de la visión. Si su examen de ojos y lentes muestra cualquier otro problema, REMUEVA LOS LENTES DE INMEDIATO Y CONTACTE A SU PROFESIONAL DE LA VISION.

**Paso 5: Centrado del lente**  
Un lente sobre la córnea (parte central del ojo), rara vez se moverá a la parte blanca del ojo durante su uso. No obstante, es algo que puede ocurrir si la colocación y la remoción no se realizan correctamente. Para centrar un lente, siga cualquiera de estos procedimientos:

- Cierre los párpados y masajee suavemente el lente a través del párpado cerrado para llevarla hasta su lugar.

O bien

- Dirija suavemente el lente descentrado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior o inferior.

**Uso del lente**  
**Tenga en cuenta las siguientes precauciones importantes mientras lleva los lentes puestos**

**Condiciones peligrosas**

- Si utiliza productos en aerosol (spray), como la laca para el cabello, mientras usa lentes, mantenga los ojos cerrados hasta que el spray se haya asentado.
- Evite todos los humos y vapores nocivos o irritantes mientras lleve puestos los lentes.
- Nunca enjuague los lentes con agua corriente del grifo pues contiene muchas impurezas que pueden contaminar o dañar sus lentes y provocar una infección o lesión ocular

**Actividad acuática**

- No exponga sus lentes de contacto al agua mientras los utiliza.

**ADVERTENCIA:**

**El agua puede contener microorganismos que pueden provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera. Si sus lentes se han sumergido en agua al realizar deportes acuáticos o al nadar en piscinas, jacuzzis, lagos o el mar, debe desecharlos y reemplazarlos por un par**

**nuevo. Póngase en contacto con su profesional de la visión para obtener recomendaciones con relación al uso de lentes de contacto cuando se realiza cualquier actividad que implique contacto con el agua**

**Soluciones lubricantes o humectantes**

- Su profesional de la visión puede recomendarle una solución lubricante o humectante. Estas soluciones pueden utilizarse para humedecer (lubricar) sus lentes mientras los usa.
- No utilice saliva ni nada que no sean las soluciones recomendadas para lubricar o rehumectar sus lentes. No coloque los lentes en su boca.

**Uso compartido de lentes**

- **Nunca** permita que nadie más utilice sus lentes. Compartir lentes aumenta en gran medida la probabilidad de infecciones oculares.

**Respete la forma de uso y frecuencia de reemplazo prescritos**

- **Nunca** use sus lentes más tiempo del recomendado por su profesional de la visión.
- **Deseche siempre** los lentes usados según lo recomendado por su profesional de la visión.

**REMOCIÓN DE LOS LENTES**

**PRECAUCIÓN:** Asegúrese siempre de que el lente esté en la córnea (centro del ojo) antes de intentar removerla. Para determinar si es así, cubra el otro ojo. Si la visión es borrosa, es porque el lente está en la parte blanca del ojo o

si quiera está en el ojo. Para encontrar el lente, revise el área superior del ojo mirando hacia abajo en un espejo mientras tira hacia arriba del párpado superior. A continuación, revise el área inferior tirando hacia abajo del párpado inferior.

1. Lávese bien las manos, enjuáguelas y séquelas. Siga el método que le recomiende su profesional de la visión. A continuación, se presenta un ejemplo de un método:

**Método de pellizco:**

**Paso 1.** Mire hacia arriba y deslice el lente hacia abajo hasta la parte inferior del ojo utilizando el dedo índice.

**Paso 2.** Pellizque suavemente el lente entre el dedo pulgar y el índice.

**Paso 3.** Retire el lente.2. Siga las instrucciones de la siguiente sección, "Cuidado de sus lentes".

**NOTA:** Para su salud ocular, es importante que el lente se pueda mover libremente por el ojo. Si el lente se pega (deja de moverse) en su ojo, aplique unas gotas de la solución humectante recomendada. Espere hasta que el lente comience a moverse libremente en el ojo antes de retirarlo. Si el lente sigue sin moverse, debe consultar inmediatamente a su profesional de la visión.

**CUIDADO DE SUS LENTES**


Recuerde que no se necesita limpieza o desinfección de sus lentes de contacto, cuando están prescritos para un uso único y reemplazo diario. Siempre deseche los lentes cuando se los retira y tenga lentes de reemplazo o anteojos disponibles.

**Fabricado por:**  
Consulte el empaque para ver el lugar de fabricación.



**USA:** Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA.

**IRELAND:** Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland ó Johnson & Johnson Vision Care (Ireland) The National Technology Park, Limerick, Irlanda

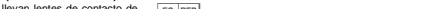

**AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland**  
[www.acuvue.com.mx](http://www.acuvue.com.mx)

**Fecha de revisión: 08/2021**  
**MEX2021RA08**

**En las etiquetas o cajas pueden aparecer los siguientes símbolos:**

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
	Precaución, Consulte las instrucciones de uso
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Utilizar antes de (fecha de caducidad)
	Código de lote
	Esterilización mediante vapor
	No reutilizar (un solo uso)
	No usar si el empaque está dañado y Consulte las instrucciones de uso
	Impuesto de gestión de residuos
	PRECAUCIÓN: La ley federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un profesional autorizado o bajo prescripción.
	Producto sanitario en la Comunidad Europea

	Indica un sistema único de barrera estéril
	Filtro ultravioleta
	Represente Autorizado en la Comunidad Europea
	Marcado europeo y número de identificación de organismo notificado
	Lentes para Astigmatismo
	Diámetro
	curva base
	Dioptrías (potencia de el lente)
	Eje
	Cilindro
	Orientación Correcta del lente
	Orientación Incorrecta del lente (Lente al revés)
	Apertura del envase/ blister
	Ícono de apertura (Cartón)
	Contiene sustancias peligrosas

**Lentes de Contacto**  
**1-DAY ACUVUE MOIST® con LACREON®**  
**1-DAY ACUVUE MOIST® con LACREON® para ASTIGMATISMO**  
**(etafilcon A)**

Para uso único y reemplazo diario. Con tinte de Visibilidad y Bloqueo UV (ultravioleta). **Producto estéril.** No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa. Esterilizado usando vapor. No requiere condiciones especiales de almacenaje.

**HECHO EN E.U.A. por: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.** 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, EUA, 32256 ó

**HECHO EN IRLANDA por: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC**

The National Technology Park, Limerick, Irlanda ó **Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)** The National Technology Park, Limerick, Irlanda.

**Importado y/o distribuido por: Johnson & Johnson de México, S.A. de C. V.** Autopista México Querétaro KM 34.5 Nave 6 Interior 4-A, Colonia Rancho San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, México.

Registro No. **1258C2009 SSA, 0880C2012 SSA.** ATENCIÓN AL CLIENTE: 001855 8611702, e-mail: [contactenos.mx@acuvue.com](mailto:contactenos.mx@acuvue.com)

**Venta y Uso Bajo prescripción de un profesional idóneo. Léase Instructivo anexo.**

Lote ver , fecha de caducidad ver en empaque

**SAP # 20401295** **LB20211DAVM4038**